

## Installationsanleitung

Teil #: 70-0243D / 70-0242 / 70-0251 (siehe Gebrauchsanweisung für SSU-D und SSUmini)

## SSU-D / SSUmini

Wenn der Filter von außen gereinigt werden muss, verwenden Sie 1%iges Bleichmittel. VERMEIDEN Sie den Kontakt zwischen dem Filter und der Chemikalie Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC).<sup>(1)</sup>

Fragen oder Probleme?  
Lassen Sie uns helfen!

Anrufen:  
**+1 (201) 343-5202, Ext. 1**


## Für SSU-D



Hände WASCHEN, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.

TRAGEN Sie vor der Handhabung des Filters Handschuhe.


Handdesinfektionsmittel, die im Gesundheitswesen verwendet werden, können die Leistung des Produktmaterials beeinträchtigen.<sup>(1)</sup>

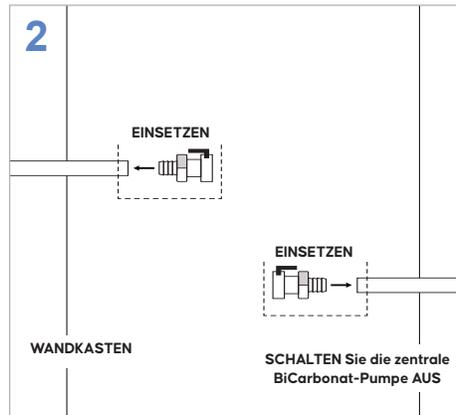

SCHALTEN Sie die zentrale BiCarbonat-Pumpe AUS.

Schneiden Sie den Bicarbonat-Schlauch hinter dem Wandkasten zwischen dem Anschluss des Schleifenauslasses und dem Bicarbonat-Behältereinlass im Wandkasten durch.

SETZEN Sie einen Schnellverbinder in beide offenen Schlauchenden EIN.

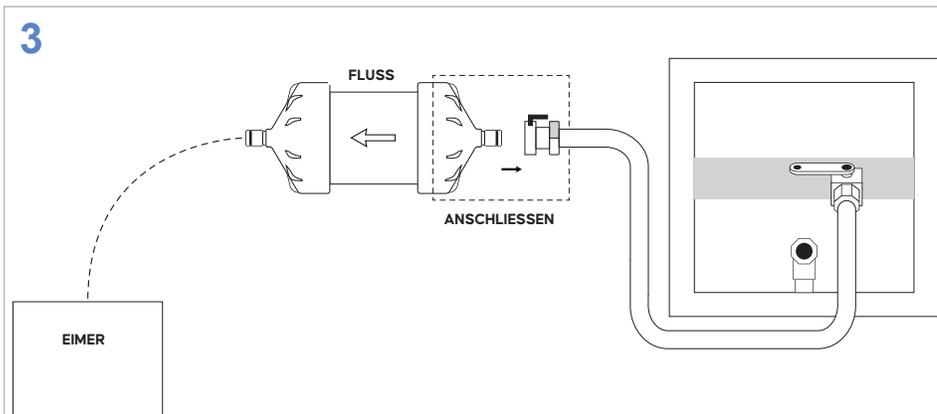

Bei Einsatz eines SSU-D ist es notwendig, zunächst den FILTER mit RO-Wasser zu befüllen.

Wenn kein Schnellverbinder an der RO-Leitung montiert ist (z. B. für einen DSU-D Filter), muss eine Adapterleitung verwendet werden.

SCHALTEN Sie das RO-Wasser am Wandkasten AUS und trennen Sie die Leitung, die zum Dialysegerät führt.

SCHLIESSEN Sie mit dem geeigneten Verbinder eine Leitung am Auslass des Wandkastens an (Schnellverbinder, Schlauchkupplung usw.). Das andere Ende der Leitung mündet im APC Schnellverbinder.

STELLEN Sie einen Eimer unter den Filterauslass, da Wasser aus dem Filter fließen wird.

SCHLIESSEN Sie das SSU-D an den Schnellanschluss an.

SCHALTEN Sie das RO-Wasser EIN und BEFÜLLEN Sie den Filter mindestens 2 Minuten lang.

## Installationsanleitung


Teil #: 70-0243D / 70-0242 / 70-0251 (siehe Gebrauchsanweisung für SSU-D und SSUmini)

**Wenn der Filter von außen gereinigt werden muss, verwenden Sie 1%iges Bleichmittel. VERMEIDEN Sie den Kontakt zwischen dem Filter und der Chemikalie Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC).<sup>(1)</sup>**

Fragen oder Probleme?  
Lassen Sie uns helfen!


Anrufen:  
**+1 (201) 343-5202, Ext. 1**

## Für SSU-D SSU-D (fortgesetzt)

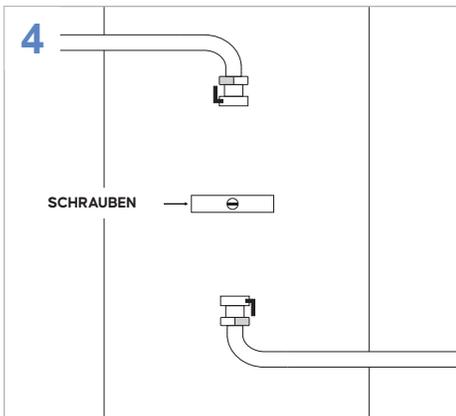

**4** WÄHLEN Sie eine Stelle an der Wand in der Nähe des Wandkastens in der Position, in die der Filter eingebaut wird.

BOHREN Sie ein Loch für die Schraube des C-Clip und MONTIEREN Sie den Clip mit der beiliegenden Schraube.

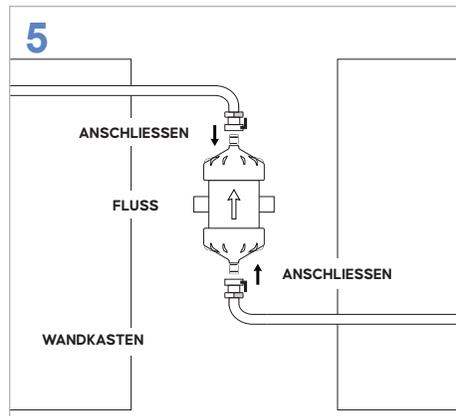

**5** DRÜCKEN Sie den Filter in den C-Clip, so dass die Flussrichtung in Richtung Wandkasten geht.

SCHLIESSEN Sie den Schnellverbinder der Bikarbonat-Pumpenleitung an den Filtereinlass.

SCHLIESSEN Sie den Schnellverbinder des Bicarbonat-Behälters im Wandkasten an den Auslass des SSU-D.

BEFÜLLEN Sie die Bicarbonat-Leitung, indem Sie ein Anschlussstück am Bicarbonat-Behälter im Wandkasten anschließen. BEFÜLLEN Sie die Leitung, bis Bicarbonat aus dem Schlauch austritt.

## Installationsanleitung


Teil #: 70-0243D / 70-0242 / 70-0251 (siehe Gebrauchsanweisung für SSU-D und SSUmini)

**Wenn der Filter von außen gereinigt werden muss, verwenden Sie 1%iges Bleichmittel. VERMEIDEN Sie den Kontakt zwischen dem Filter und der Chemikalie Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC).<sup>(1)</sup>**

Fragen oder Probleme?  
Lassen Sie uns helfen!

Anrufen:  
**+1 (201) 343-5202, Ext. 1**


## Für SSUmini

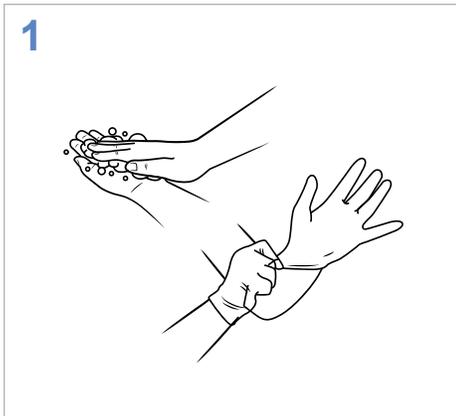

Hände **WASCHENWASCHEN**, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.


**TRAGEN** Sie vor der Handhabung des Filters Handschuhe.

Handdesinfektionsmittel, die im Gesundheitswesen verwendet werden, können die Leistung des Produktmaterials beeinträchtigen.<sup>(1)</sup>

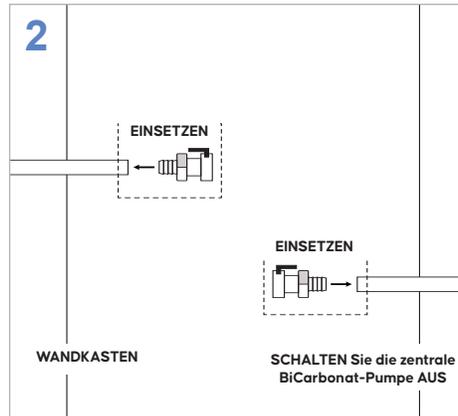


**SCHALTEN** Sie die zentrale BiCarbonat-Pumpe **AUS**.

Schneiden Sie den Bicarbonat-Schlauch hinter dem Wandkasten zwischen dem Anschluss des Schleifenauslasses und dem Bicarbonat-Behältereinlass im Wandkasten durch.

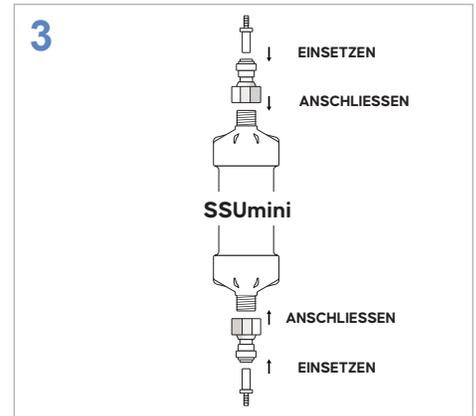

**SCHLIESSEN** Sie ggf. den John-Guest Verbinder an die Gewindeanschlüsse am Einlass und Auslass des SSUmini an.

**SETZEN** Sie das Anschlussstück in die Öffnung des John-Guest-Adapters **EIN**. Stellen Sie sicher, dass das Anschlussstück fest im Anschluss sitzt, indem Sie daran ziehen.

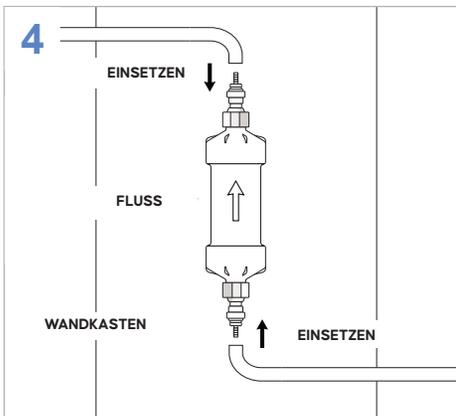

Für den SSUmini: Die **FLUSSRICHTUNG** des Filters sollte in Richtung des Wandkastens zeigen.

Für den SSUmini: **SETZEN** Sie die Schlauchtülle vom Filtereinlass in die Bicarbonat-Pumpenleitung ein.

Für den SSUmini: **SETZEN** Sie die Schlauchtülle des SSUmini-Auslasses in den Schlauch des Bicarbonat-Behälters im Wandkasten.

**BEFÜLLEN** Sie die Bicarbonat-Leitung, indem Sie ein Anschlussstück am Bicarbonat-Behälter im Wandkasten anschließen. **BEFÜLLEN** Sie die Leitung, bis Bicarbonat aus dem Schlauch austritt.

(1) Die Chemikalie ADBAC kann zu strukturellen Schäden am Filter führen.

### HERSTELLER:

**Nephros, Inc.**  
380 Lackawanna Place, South Orange, NJ 07079, USA  
+1 (201) 343-5202

### MONTIERT BEI:

**MEDICA S.p.A.**  
Via Degli Artigiani, 7  
41036 Medolla (MO),  
Italien